



Attelle pouce Deluxe Futuro™

Niveau de support : modéré - stabilisant


L'attelle du pouce Futuro™ offre une protection confortable et un soutien stabilisateur pour aider à soulager les douleurs en cas d'irritation du pouce (ex. pouce du skieur, manipulation de manettes...)

Indications :

- Arthrite.
- Lésions causées par des tensions répétitives.
- Maladie articulaire dégénérative du pouce.

Caractéristiques spécifiques :

Supports latéraux pour stabiliser les articulations du pouce. Conception brevetée assurant un alignement naturel de la main sans entraver son mouvement.

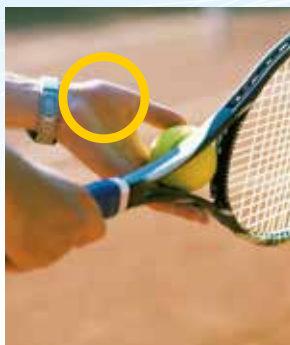

Autres caractéristiques et avantages :

- N'entrave pas la mobilité des autres doigts.
- Conception brevetée et fixations réglables pour un ajustement sur mesure.
- Fixations du poignet réglables pour plus de soutien.
- Deux baleines pour le maintien de l'articulation de base du pouce.
- Matériau doux, solide, sans latex qui laisse respirer la peau pour plus de confort.
- facile à enfiler et retirer.
- Pour main droite ou gauche.



MATÉRIAU
QUI LAISSE
RESPIRER LA
PEAU



Mode d'emploi



1. Ouvrir toutes les sangles. Glisser et ajuster le support autour de la main et fixer la sangle à la base du poignet, puis fixer la sangle du pouce.




2. Enrouler la longue sangle autour du poignet et la fixer. Serrer toutes les sangles jusqu'à ce que le maintien soit ferme mais confortable.



3. Les baleines peuvent être réglées pour obtenir le positionnement désiré ou retirées pour un support modéré.

Tailles et informations de commande

Mesurer la taille comme illustré.

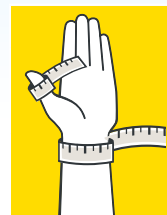

Dimensions	Taille	N° d'article	Code Pharmacie BE
5 - 6,3 cm (pouce) / 12,6 - 17,7 cm (poignet)	S/M	45841DAB	CNK 2403-558
6,3 - 7,8 cm (pouce) / 17,7cm - 23 cm (poignet)	L/XL	45842DAB	CNK 2403-541

Matériau :

Nylon, polyester, mousse uréthane, spandex

Instructions de nettoyage pour les bandages Futuro™

Lavage à la main jusqu'à 30 °C



L'utilisation d'eau de javel, le séchage en séchoir, le repassage et le nettoyage à sec sont à proscrire

