

Proseptine® plus 125 ml

GEBRUIK

Proseptine® is een ideaal solvent voor het verwijderen van kleefverband, lijmresten en sporen van teer.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR HET VERWIJDEREN VAN PLEISTERS EN KLEEFVERBAND

- Til de rand van het kleefverband op en breng een kompres aan gedrenkt in Proseptine®. Laat enkele seconden inwerken.

Verwijder zachtjes het verband. Verwijder systematisch en zorgvuldig alle resten van Proseptine® na gebruik. Wacht tot de plaats droog is vooraleer een nieuw verband aan te brengen.

VOOR HET VERWIJDEREN EN OPLOSSEN VAN LIJMRESTEN EN TEER

- Breng een kompres aan gedrenkt in Proseptine®, laat enkele seconden inwerken en verwijder de resten met dezelfde kompres. Verwijder systematisch en zorgvuldig alle resten van Proseptine® na gebruik en voornamelijk in geval van het aanbrengen van een nieuw verband.

USAGE

Proseptine® est un solvant idéal pour décoller les pansements adhésifs et dissoudre les résidus de colle et les traces de produits pétroliers.

MODE D'EMPLOI

POUR DÉCOLLER SPARADRAP ET PANSEMENTS ADHÉSIFS

- Soulever le bord de l'adhésif et appliquer une compresse imprégnée de Proseptine®. Laisser agir quelques secondes. Enlever doucement le pansement. Essuyer systématiquement et soigneusement toute trace de solution anti-adhésive Proseptine® après utilisation. Attendre que l'endroit soit sec avant d'appliquer un nouveau pansement.

POUR ÉLIMINER ET DISSOUDRE LES RÉSIDUS DE COLLE ET DE PRODUITS PÉTROLIERS

- Appliquer une compresse imprégnée de Proseptine®, laisser agir quelques secondes et ôtez les résidus avec la même compresse. Essuyer systématiquement et soigneusement toute trace de solution anti-adhésive Proseptine® après utilisation et notamment en cas de réapplication d'un nouveau pansement.

INGREDIËNTEN – INGRÉDIENTS

Isododecane, Paraffinum liquidum, Hexyldecanol

UITWENDIG GEBRUIK - USAGE EXTERNE

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

- Zorg ervoor dat wanneer de ontklevende oplossing niet gebruikt wordt, deze niet wegvloeit en beschadigde huid, wonden of slijmvliezen bereikt, vandaar de noodzaak om na elk gebruik van Proseptine® alles te reinigen met behulp van een droog kompres.
- Vermijd langdurig contact met Proseptine®.
- Gebruik Proseptine® voorzichtig bij oudere personen.

NIET GEBRUIKEN dicht bij een open vuur of een warmtebron of een bron van elektrische vonken zoals een elektrische bistourie.

CONTRA-INDICATIES

NIET INSLIKKEN - NIET INADEMEN

NIET GEBRUIKEN op de slijmvliezen, op wonden, op beschadigde huid of dicht bij de ogen en bij kinderen onder de 30 maanden.

ONGEWENSTE EFFECTEN

- Irritatie en gevoel van brandwonden.
- De richtlijnen voor gebruik en de voorzorgsmaatregelen goed respecteren om ongewenste effecten te vermijden.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN

Bewaren onder 25°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Lors de l'application, s'assurer que la solution anti-adhésive ne coule pas et n'atteigne pas les plis cutanés, les plaies et les muqueuses, d'où la nécessité d'essuyer à l'aide d'une compresse sèche après toute application de PROSEPTINE®.
- Éviter le contact prolongé avec la peau.
- Utiliser avec précaution chez la personne âgée.

NE PAS UTILISER près d'une flamme ou toute source de chaleur ou d'étincelle comme un bistouri électrique.

CONTRE-INDICATIONS

NE PAS AVALER - NE PAS INHALER

NE PAS APPLIQUER sur une muqueuse, sur une plaie, une peau lésée ou près des yeux et chez l'enfant de moins de 30 mois.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Irritations et sensations de brûlures.
- Bien respecter les consignes d'utilisation et les précautions d'emploi afin d'éviter des effets indésirables.

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.