

# KELO-COTE®

## UNE LARGE GAMME POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

### LES RÉFÉRENCES KELO-COTE®

Dispositif médical de classe I



#### Tube de 6 g

Quantité nécessaire pour traiter une cicatrice inférieure à 7,5 cm de longueur pendant 2 à 3 mois.



#### Tube de 15 g

Quantité nécessaire pour traiter une cicatrice comprise entre 7,5 et 10 cm de longueur pendant 2 à 3 mois.



#### Tube de 15 g UV

Quantité nécessaire pour traiter une cicatrice comprise entre 7,5 et 10 cm de longueur pendant 2 à 3 mois.


Contient des écrans solaires haute protection (SPF 30)

CONVIENT AUX ENFANTS ET AUX PERSONNES AYANT LA PEAU SENSIBLE<sup>(7)</sup>

### KELO-COTE® : MODE D'UTILISATION



- Appliquer Kelo-cote® en couche mince sur la cicatrice propre et sèche, 2 fois par jour
- Laisser sécher 4 à 5 minutes
- Retirer l'excédent de Kelo-cote® si le produit n'a pas séché
- Le gel s'applique sur une cicatrice fermée
- Durée de traitement recommandée : 2 à 3 mois

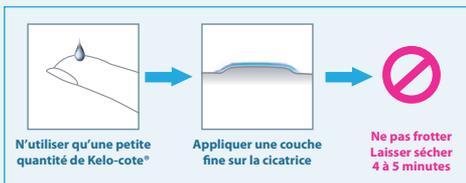


Kelo-cote® UV s'applique 30 minutes avant l'exposition au soleil. Renouveler l'application d'un écran solaire toutes les 2 heures ou plus souvent si nécessaire.

**Mises en garde :** Éviter le contact direct avec les yeux, les muqueuses, les brûlures du troisième degré et les plaies ouvertes. Kelo-cote® ne doit pas être utilisé sur des affections dermatologiques qui perturbent l'intégrité de la peau. Kelo-cote® peut tacher les vêtements s'il n'est pas complètement sec. Kelo-cote® est réservé exclusivement à un usage externe. En cas d'irritation, cesser l'utilisation et consulter un médecin. Ce produit doit être conservé hors de la portée des enfants. Conserver à une température inférieure à 25°C. Ne pas utiliser après la date de péremption (EXP) imprimée sur le tube.

Photo: J. Bileci DMED/10084X - Janvier 2014-KELO/001

VOUS AVEZ UNE CICATRICE ?  
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN  
OU VOTRE PHARMACIEN

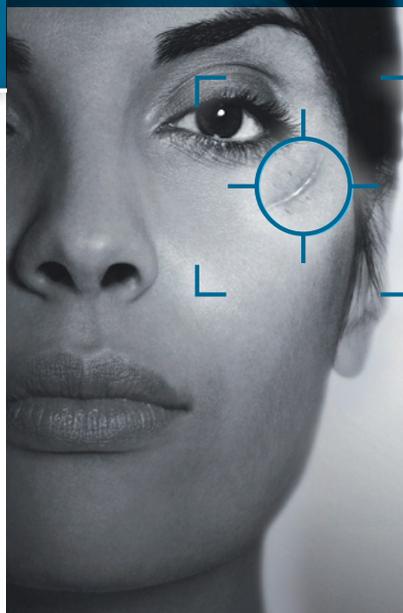

## UNE BELLE CICATRICE EST UNE CICATRICE QUI S'OUBLIE



Une formule de silicone brevetée en prévention et en traitement des cicatrices hypertrophiques et chéloïdes

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE I  
DISPONIBLE EN PHARMACIE

BIOCODEX Benetux

Plus d'infos sur [www.kelo-cote.be](http://www.kelo-cote.be)

SINCLAIR

<sup>1</sup> Bayat A, McGruther DA, Ferguson MW. Skin scarring. BMJ 2003;326:88-92. <sup>2</sup> Mustoe TA, Cooter RD, Gold MH et al. International Clinical Recommendations on Scar Management. Plast Reconstr Surg 2002;110(2):560-571. <sup>3</sup> Testimonials patients - www.kelocote.com <sup>4</sup> English RS, Shenellett PD. Dermatol Surg 1999; 25:631-638. <sup>5</sup> Sebastian G, Burbaum-Conradi H, Fischer S et al. Efficacy and Tolerability of a Novel Silicone Gel for Scar Treatment. Akt Dermatol 2004;30:450. <sup>6</sup> Signorini M, Clementoni MT. Clinical Evaluation of a New Self-Drying Silicone Gel in the Treatment of Scars: A Preliminary Report. Aesth Plast Surg 2007;31:183-187. <sup>7</sup> Sepehrmanesh M. Anwendungsbeobachtung mit DermatrixTM Gel an 1522 Patienten. Kompendium Dermatologie 2006;1:30-32. CE

# CICATRICES

## SAVOIR LES RECONNAÎTRE POUR MIEUX LES TRAITER

# KELO-COTE®

## UNE SOLUTION EFFICACE ET ESTHÉTIQUE

Suite à une plaie (causée par une blessure accidentelle, une opération chirurgicale, une brûlure, etc.), la peau guérit habituellement en laissant une cicatrice permanente, plane et légèrement colorée : on parle alors de cicatrice normale ou « mature ».

Mais si le mécanisme de cicatrisation est perturbé, la cicatrice peut devenir inesthétique : on parle alors de cicatrice anormale.

### CICATRICES ANORMALES

QUELLES SONT LES FORMES LES PLUS FRÉQUENTES ?<sup>(1,2)</sup>



- Les **cicatrices hypertrophiques** sont des cicatrices en relief de couleur rouge, pouvant démanger.
- Elles se limitent généralement à la zone lésée sans s'étendre au-delà de la cicatrice d'origine et peuvent régresser spontanément.
- Ces cicatrices apparaissent habituellement quelques semaines après une opération, une blessure ou une brûlure.



- Les **cicatrices chéloïdes** forment des boursofflures, de coloration rouge-brune, pouvant être douloureuses et provoquer des démangeaisons.
- Ces boursofflures ont tendance à s'étendre sur les tissus sains avoisinants et ne régressent pas spontanément.
- Ces cicatrices apparaissent souvent plusieurs mois après la plaie initiale.

“ Suite à une césarienne, ma cicatrice était très sensible, j'étais inconfortable même en portant des pantalons larges...”  
**Sharon<sup>(3)</sup>**



### QUELS SONT LES FACTEURS POUVANT ENTRAÎNER LE DÉVELOPPEMENT D'UNE CICATRICE ANORMALE ?<sup>(1,4)</sup>

Le risque de développer une cicatrice anormale dépend notamment de la localisation de la cicatrice, du type de peau, ainsi que de l'âge du patient.

Les cicatrices anormales se forment le plus fréquemment au niveau de la zone du décolleté, du dos, des jambes, des épaules et des articulations.

Les patients à peau noire ou métissée sont génétiquement prédisposés à développer des cicatrices anormales, en particulier de type chéloïde.

Les enfants aussi sont plus à même de développer des cicatrices anormales.

**Kelo-cote®** est un gel de silicone breveté, indiqué en prévention et en traitement des cicatrices hypertrophiques et chéloïdes :

- Récentes ou anciennes<sup>(5)</sup>
- Petites ou étendues
- Faisant suite à des opérations chirurgicales, des blessures, des brûlures...




### Kelo-cote®, les bénéfices produit :

- Réduit la rougeur des cicatrices<sup>(5,7)</sup>
- Assouplit et aplatit les cicatrices surélevées<sup>(5,7)</sup>
- Soulage les démangeaisons et la douleur associées aux cicatrices<sup>(5,7)</sup>
- Gel de silicone transparent et inodore
- Sèche rapidement en 4 à 5 minutes
- Une fois sec, peut être recouvert de cosmétiques ou d'écran solaire
- Idéal pour les surfaces irrégulières, le visage, les articulations ou encore les plis de flexion
- Pas de nécessité de raser ou d'épiler la zone à traiter au préalable
- Pas d'effet de macération grâce au film semi-occlusif de Kelo-cote®



### Kelo-cote®, une efficacité prouvée<sup>(5,6)</sup>

Après traitement, Kelo-cote® améliore significativement les symptômes associés à la cicatrice anormale (hypertrophique ou chéloïde) : la cicatrice s'assouplit, devient plus blanche, moins douloureuse et les démangeaisons sont soulagées.

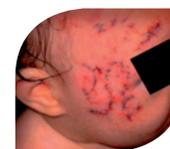

1 jour après le traumatisme



3 mois après traitement par Kelo-cote®



“ Kelo-cote® ça marche ! Mes cicatrices s'estompent progressivement. En plus, c'est un produit vraiment facile à utiliser.”  
**TaNeshia<sup>(5)</sup>**

POUR RÉPONDRE AU PROBLÈME DES CICATRICES ANORMALES, UNE NOUVELLE SOLUTION PRODUIT EXISTE...