

# LAMIDERM Crème

## Composition

Eau purifiée, monostéarate d'éthylène glycol, paraffine liquide légère, pentanediol, acide stéarique, paraffine solide, perhydrosqualène, huile d'avocat, alginate de sodium, trolamine, palmitate de cétyle, sorbate de potassium, parfum honélia

## Indications

- Usage cutané
- En cas de brûlures du premier et du second degré, de coups de soleil et toute autre plaie non infectée
- En cas de rougeurs de la peau suite à des traitements radiothérapeutiques

## Mode d'emploi

### Ouverture du tube

Lors de la 1ère utilisation, percer l'opercule à l'aide du bouchon.

#### - Brûlures du premier degré et coups de soleil

Appliquer Lamiderm en couche épaisse et laisser pénétrer sans masser.

Renouveler 2 à 4 fois par jour.

#### - Brûlures du second degré et toute autre plaie non infectée

Après nettoyage de la brûlure ou de la plaie non-infectée, appliquer Lamiderm en couche épaisse et renouveler les applications plusieurs fois par jour. Recouvrir si besoin d'une compresse humidifiée.

Ne pas utiliser de pansement absorbant sec.

#### - Rougeurs de la peau suite à des traitements radiothérapeutiques

Appliquer Lamiderm 2 à 3 fois par jour selon les recommandations du médecin, en faisant pénétrer par un léger massage.

## Précautions d'emploi

Ne pas utiliser en cas de

- Plaie avec saignement
- Plaie infectée

Ce dispositif médical n'est pas un protecteur solaire.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants du produit.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à l'abri de la chaleur et dans l'étui.

Ne pas dépasser la date d'utilisation mentionnée en clair sur l'emballage et le tube.

## Caractéristiques

Tube de 60 ml.

**Date de révision:** 07/2016

**Distributeur:** Qualiphar N.V./S.A.

Rijksweg 9

B-2880 Bornem

**Fabricant:** Gifrer Barbezat

8 -10 rue Paul Bert

69150 DECINES CHARPIEU – France

CE1370