

BoroStyrol[®] Gel buccal

Acide hyaluronique

Traitement des aphtes, gingivites et autres lésions buccales bénignes

Soulage la douleur grâce à l'effet barrière et favorise la cicatrisation

Ne pique pas (ne contient pas d'alcool) – N'irrite pas – Sans sucre – Sans danger en cas d'ingestion

BoroStyrol[®] est un dispositif médical à base d'acide hyaluronique à faible poids moléculaire, composé naturellement présent dans la muqueuse orale.

Grâce à ses propriétés mucoadhésives au contact de la muqueuse buccale, **BoroStyrol[®]** adhère fermement et forme un film protecteur qui agit par un effet barrière sur la zone lésée soulageant ainsi la douleur. Il agit localement en protégeant et hydratant les tissus, favorisant ainsi la cicatrisation et contribuant à leur régénération.

Mode d'emploi :

Avec un coton-tige ou avec le doigt soigneusement lavé, appliquer de façon uniforme une fine couche de **BoroStyrol[®]** sur la lésion buccale. En cas de gingivite, masser délicatement pour favoriser l'application jusque dans l'espace inter-dental.

Appliquer **BoroStyrol[®]** au moins 3 fois par jour, de préférence après les principaux repas et l'hygiène bucco-dentaire. De cette façon, le film protecteur sera ainsi maintenu plus longtemps. Si la douleur persiste, **BoroStyrol[®]** peut être appliqué plus de 3 fois par jour.

INOFFENSIF EN CAS D'INGESTION ACCIDENTELLE.

Attention :

En cas d'irritation locale ou d'hypersensibilité au produit, arrêter le traitement.

Tenir hors de portée des enfants.

Consulter votre médecin si les symptômes persistent.

Précautions d'utilisation :

Refermer le tube immédiatement après utilisation. Les propriétés et la conservation de **BoroStyrol[®]** sont garanties par l'intégrité du tube.

BoroStyrol[®] convient aux enfants à partir de 36 mois.

Conserver à une température comprise entre 5 °C et 40 °C.

Date de révision : Mai 2011.

Dispositif médical de classe II a

Distribué en France par :

Laboratoires MAYOLY SPINDLER

6 avenue de l'EUROPE – BP 5178401

CHATOU CEDEX France

Informations médicales : +33 (0)1 34 80 72 60

Fabriqué par :

BIOFARMITALIA S.p.A

Via Ampere 19/21

20037 Paderno Dugnano (MI)

Italie